


INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar la herida y la piel circundante y asegurarse que esté libre de grasa, aceite o disolventes.
2. En heridas sometidas a elevada tensión, debe aplicarse sutura intradérmica o subcutánea.
3. Debe evitarse que el adhesivo penetre la herida abierta o fluya hacia los ojos colocando la herida de forma horizontal.
4. Seleccionar el aplicador adecuado para la herida, la punta fina es ideal para una aplicación precisa y de máximo control; el aplicador en esponja puede ser utilizado para crear una película antimicrobiana sobre suturas o grapas. También puede utilizarse la punta fina y luego aplicar una segunda capa que actuará como película protectora adicional.
5. Coger el tubo por la parte inferior con la apertura hacia arriba y enroscar el aplicador seleccionado sin apretar el tubo. El sello de metal queda perforado y el adhesivo tisular puede aplicarse ejerciendo una ligera presión.
6. Una vez que el adhesivo, ligeramente violeta, es visible en el aplicador debe utilizarse antes de media hora para prevenir que el adhesivo polimerice en el tubo.
7. Adaptar los bordes de la herida con los dedos o con unas pinzas. Una sola capa es suficiente para obtener un cierre seguro y duradero.
8. Mantener los bordes unidos durante mínimo 25 segundos. La polimerización depende del nivel de hidratación de la piel y de la humedad del aire, y debería finalizar tras 60 segundos a más tardar.
9. Tras la polimerización de la primera capa puede aplicarse, opcionalmente, una segunda capa más amplia, con el aplicador de esponja, que actuará como película protectora adicional.
10. Se puede aplicar un apósito adicional cuando el adhesivo se encuentre totalmente seco.
11. Informar al paciente sobre cómo cuidar correctamente la herida tratada con Leukosan Adhesive. No utilizar lociones, cremas o pomadas u otros líquidos sobre la película adhesiva o alrededor de la misma. El adhesivo se desprenderá durante la fase de reepitelización de la piel. Si la herida se abriera o se infectara, contactar con el médico inmediatamente.

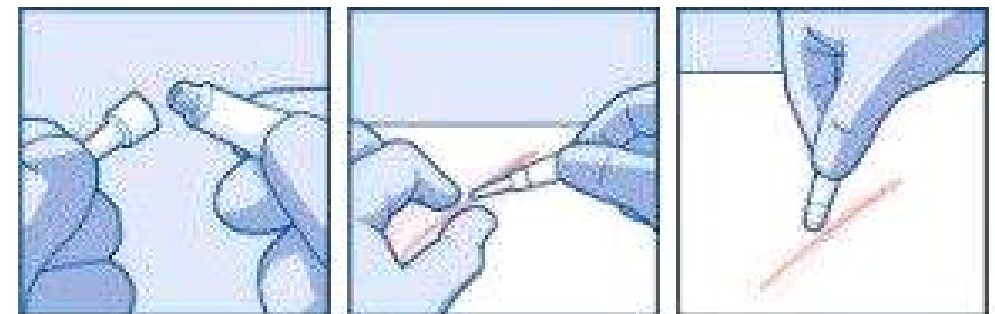

¿Cómo me cuido el adhesivo cutáneo que cubre mi herida?

- **Mantenga su herida limpia y seca** por 1 a 5 días. Usted puede ducharse 24 horas después de que se le ha aplicado el adhesivo para la piel. Seque su herida después de la ducha ligeramente con unas palmaditas suaves.
- **No remoje su herida en agua**, como en un baño de tina o jacuzzi.
- **No frotar** ni restregar su herida ni se quite el adhesivo. Esto podría reabrir su herida.
- **No aplique ungüentos** en su herida. Los cuales incluyen los antibióticos y otros ungüentos que contienen vaselina. Estos productos retirarán el adhesivo cutáneo y se volverá a abrir su herida.

¿Cuándo debo comunicarme con mi médico?

- Tiene fiebre.
- Su herida está roja, inflamada y se siente tibia al tacto.
- Usted tiene preguntas o inquietudes acerca de su condición o cuidado.

¿Cuándo debo buscar atención inmediata?

- Su herida está drenando pus.
- Su herida se abre.